

USB 等外付けできる媒体にファイルをコピーするやりかた (ローカルにファイルを置く)

<条件>

- ・アンドロイド端末で USB メモリが利用可能な場合 (USB メモリーにて保存可能)
- ・MicroSD メモリが利用可能な場合


上記 2 つの場合、利用可能なメモリに測定データをコピーすることで PC に移行できます。

手順は以下の通りです。


1. ファイルエクスプローラ機能のあるアプリ (例は ES ファイルエクスプローラー) をダウンロードします。
2. USB メモリ又は MicroSD を差し込む。
3. ES ファイルエクスプローラをタップする。




4. ローカルに合わせ、ZZZlogger をタップします。

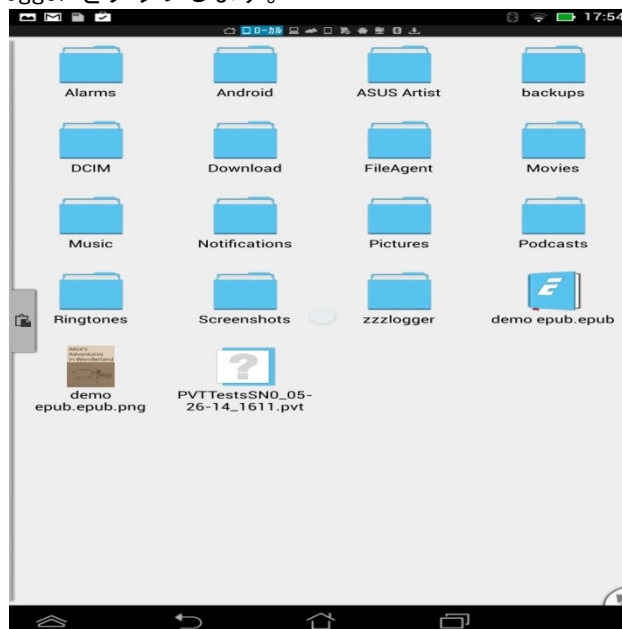

5. 測定データを長押しして画面下図に出てくる、コピーをタップします。(PVT データのコピーを例にしております。)

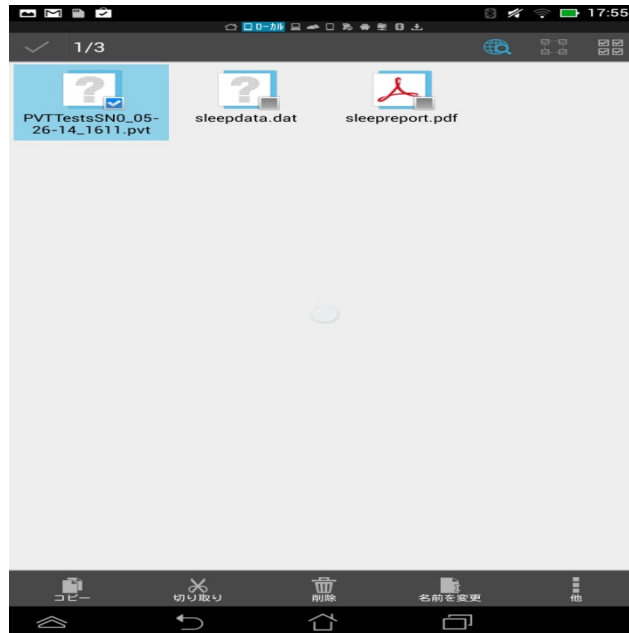

6. 戻るをタップします。
7. 画面を右にスワイプしてホームにします。

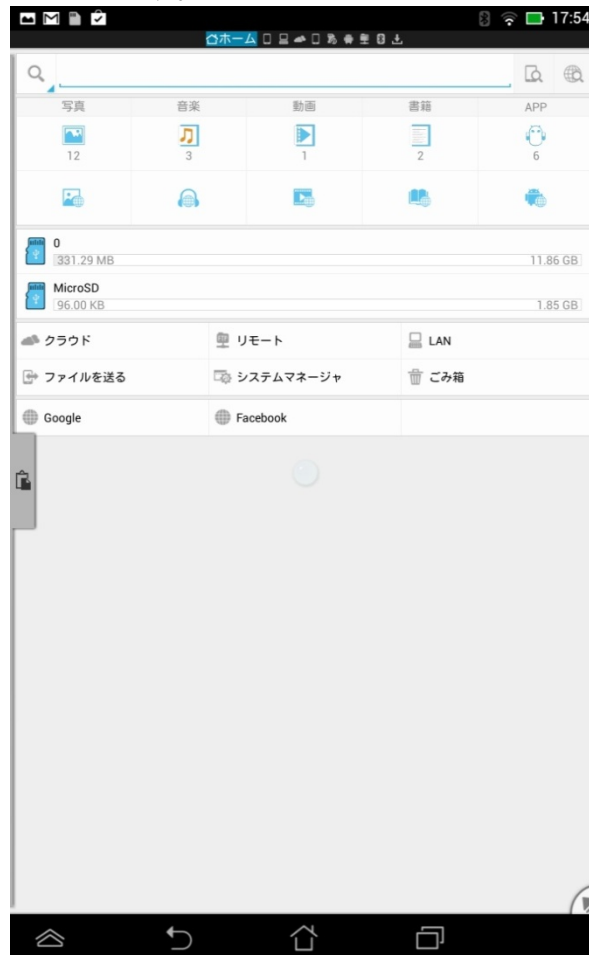

8. MicroSD をタップします。
9. 長押ししてペーストします。
10. MicroSD 又は USB メモリをマウント解除してから取り出し、PC で読み取ります。

1. 備考

ASUS—ME173_JP_user_4.2.4.31212（通称 MemoPad）の初期設定例

→チェックをはずす

→チェックを ON にする。

○ASUS カスタマイズ設定→スクリーンショット

○Wifi

○Bluetooth

○音→タッチ操作音

○音→画面ロックの音

○ユーザー→デフォルト

○電源管理→パワーセーバー→省電力設定

注意事項

ASUS メモパッドはペアリングしたままの状態、省電力モードになると一旦電源を切ってから再起動をしないと、Bluetooth を ON にできません。

Bluetooth が OFF の状態であれば省電力モードになった後も問題ありません。従いまして使用後は Bluetooth を OFF にしてください。